

AED(自動體外心臟電擊去顫器)操作說明

- 當病人因發生心室纖維顫動 (VF) 而昏迷時，我們應在**確認環境安全**後，立即**檢查病人意識**，並**立刻撥打 119**，爾後**暢通病人呼吸道**，並檢查**是否有呼吸、心跳**。

若確定 (懷疑) 病人**無意識、無呼吸、無心跳**，則立刻進行 CPR 及使用 AED 除顫電擊，並依據 AED 的指示重覆電擊或 CPR 的循環，直到救護車抵達或高級醫療人員接手。

- < 確定 (懷疑) 病人無意識、無呼吸、無心跳，則開始使用 AED >**

Step1. 打開電源

Step2. 將貼片貼在病人身上 (電擊貼片黏貼位置如有潮溼，必須擦乾，並緊貼於皮膚；如有外傷亦需避開。)

Step3. AED 自動分析心律，不要碰觸病人

Step4. 依據機器指示，如需電擊，待機器充完電後按下電擊鈕

※緊急醫療救護法：救護人員以外之人使用 AED 救人免責 (救護人員於非值勤期間，亦適用之)

心肺復甦術程序(叫叫CD)

